

GANIKDERMA®

Modo de presentación :

Código del producto	Forma de presentación/ Dimensiones/ Cantidad	N.º de piezas/caja individual
C3010	Compresa impregnada, 10 cm x 10 cm	10
A1501	Aplicador con 15 ml de pomada	1
T020	Tubo con 20 ml de pomada	1
T050	Tubo con 50 ml de pomada	1
T100	Tubo con 100 ml de pomada	1
R500	Recipiente con 500 ml de pomada	1

Presentación :

La pomada **GANIKDERMA®** es una preparación tópica con efecto barrera.

Durante la fase inflamatoria de la cicatrización de heridas, gracias a su acción filmógena, la pomada ayuda a crear un ambiente húmedo que favorece la eliminación natural del tejido necrótico (desbridamiento autolítico). Su acción es física: el producto mantiene el exudado en contacto con el tejido necrótico, promoviendo así su separación sin dañar el tejido sano circundante.

Durante la fase de granulación, la barrera semipermeable que forma la pomada ayuda a mantener un equilibrio óptimo de humedad, condición necesaria para la formación del tejido de granulación. Además, gracias a las propiedades absorbentes del subgalato de bismuto contenido en su formulación, ayuda a gestionar el exceso de exudado, que, en grandes cantidades, puede dificultar la cicatrización. El efecto semioclusivo de la pomada refuerza las defensas naturales del organismo, limitando la evaporación de exudados y previniendo así la formación de costras secas, que pueden retrasar la reepitelización.

Finalmente, el pH ligeramente ácido de la pomada **GANIKDERMA®** (4,0-5,5) ayuda a mantener un microambiente fisiológicamente propicio para la cicatrización, desfavorable para la proliferación de microorganismos que pueden comprometer el proceso de cicatrización.

Indicaciones :

- Adyuvante en el tratamiento local de heridas agudas: quemaduras de primer, segundo y tercer grado, abrasiones, úlceras, heridas traumáticas y otras lesiones cutáneas superficiales.
- Adyuvante en el tratamiento local de cicatrices patológicas (cicatrices hipertróficas y queloides).
- Adyuvante en el tratamiento local de úlceras por presión, úlceras vasculares crónicas y úlceras del pie diabético.
- Adyuvante en el tratamiento local tras peeling químico o láser.

- Adyuvante en el tratamiento local de la zona donante durante los injertos de piel.
- Adyuvante en el tratamiento local de la epidermólisis ampollosa.
- Adyuvante en el tratamiento local del eccema húmedo, la dermatitis de contacto, la psoriasis y la radiodermatitis.
- Adyuvante en el tratamiento local del acné y las lesiones herpéticas.

Instrucciones de uso :

Antes de cada uso, se recomienda lavarse y secarse las manos con agua y jabón. Limpie la herida con solución salina (NaCl al 0,9 %) o solución de Ringer antes de cada aplicación de la pomada, asegurándose de que se absorba el exceso de solución. Aplique la pomada sobre toda la herida en una capa de 1 a 2 mm. Cubra la herida con una compresa estéril o un apósito de tela no tejida, fijándolo con un adhesivo. Cambie el apósito cada 1 o 2 días en caso de úlceras y heridas. Aplique de 3 a 4 veces al día en caso de problemas dermatológicos. Se recomienda el uso de apósitos no traumáticos, ya que la pomada evita que la gasa se adhiera a la piel. No aplique ningún otro producto tópicamente, ya que esto podría alterar las propiedades terapéuticas de la pomada. Continúe la aplicación hasta la cicatrización completa.

Advertencias :

Este producto es solo para uso externo; su ingestión puede causar problemas digestivos. No se conocen interacciones ni incompatibilidades con otros medicamentos. No se ha estudiado específicamente su uso durante el embarazo y la lactancia; su uso debe ser evaluado por un médico.

GANIKDERMA® no afecta la capacidad para conducir ni operar maquinaria.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.

Efectos secundarios :

Debido a su mecanismo de acción, puede presentarse una sensación de ardor o malestar local inmediatamente después de la aplicación, a veces acompañado de fiebre alrededor de la lesión, que desaparece espontáneamente en 30 a 40 minutos. Puede presentarse picazón durante el proceso de cicatrización. Evite rascarse la zona afectada para prevenir la irritación y dañar el tejido neoformado. Reacción alérgica local a alguno de los componentes de la pomada.

No se han reportado casos de sobredosis. No se conocen incompatibilidades con otros medicamentos. Consérvese el producto a una temperatura inferior a 25 °C. El producto no utilizado y los residuos deben eliminarse de acuerdo con la normativa local.

Ingredientes :

Cera de abeja, Aceite de oliva, Aceite de girasol, Extracto de caléndula, Aceite de ricino hidrogenado, Boswellia, Subgalato de bismuto, Resina de pino, Alcanfor.