

GANIKDERMA®

Notice d'emballage :

Code produit	Forme de présentation/ Dimension/ Quantité	No. de pièces/boîte individuelle
C3010	Compresse imprégné, 10 cm x 10 cm	10
A1501	Applicateur contenant 15 ml de pommade	1
T020	Tube contenant 20 ml de pommade	1
T050	Tube contenant 50 ml de pommade	1
T100	Tube contenant 100 ml de pommade	1
R500	Récipient contenant 500 ml de pommade	1

Présentation :

La pommade **GANIKDERMA®** est une préparation topique à effet barrière.

Durant la phase inflammatoire de la cicatrisation, grâce à son action filmogène, la pommade contribue à créer un milieu humide propice à l'élimination naturelle des tissus nécrosés (débridement autolytique). Son action est physique : le produit maintient l'exsudat au contact des tissus nécrosés, favorisant ainsi leur séparation sans endommager les tissus sains environnants.

Durant la phase de granulation, la barrière semi-perméable formée par la pommade contribue au maintien d'un équilibre hydrique optimal, condition nécessaire à la formation du tissu de granulation. De plus, grâce aux propriétés absorbantes du sous-gallate de bismuth contenu dans sa formulation, elle aide à gérer l'excès d'exsudat qui, en grande quantité, peut entraver la cicatrisation. L'effet semi-occlusif de la pommade soutient les défenses naturelles de l'organisme en limitant l'évaporation des exsudats et en prévenant ainsi la formation de croûtes sèches, susceptibles de retarder la réépithélialisation.

Enfin, le pH légèrement acide de la pommade **GANIKDERMA®** (4,0–5,5) contribue au maintien d'un microenvironnement physiologiquement adapté à la cicatrisation, défavorable à la prolifération de micro-organismes pouvant compromettre le processus.

Indications :

- Adjuvant dans le traitement local des plaies aiguës : brûlures du premier, deuxième et troisième degré, écorchures, ulcères, plaies traumatiques et autres lésions cutanées superficielles.
- Adjuvant dans le traitement local des cicatrices pathologiques (cicatrices hypertrophiques et chéloïdes).
- Adjuvant dans le traitement local des escarres, des ulcères vasculaires chroniques et des ulcères du pied diabétique.
- Adjuvant dans le traitement local après peeling chimique ou laser.
- Adjuvant dans la prise en charge locale de la zone donneuse lors des greffes de peau.

- Adjuvant dans la prise en charge locale de l'épidermolyse bulleuse.
- Adjuvant dans la prise en charge locale de l'eczéma humide, de la dermatite de contact, du psoriasis et de la radiodermite.
- Adjuvant dans la prise en charge locale des lésions d'acné et d'herpès.

Mode d'emploi :

Avant chaque utilisation, il est recommandé de se laver les mains à l'eau et au savon et de les sécher. Nettoyer la plaie avec une solution saline (NaCl à 0,9 %) ou une solution de Ringer avant chaque application de la pommade, en veillant à absorber tout excédent de solution. Appliquer la pommade sur toute la plaie en une couche de 1 à 2 mm. Recouvrir la plaie d'une compresse stérile et/ou d'un pansement non tissé, en le fixant avec un adhésif pour pansement. Changer le pansement tous les 1 à 2 jours en cas d'ulcères et de plaies. Appliquer 3 à 4 fois par jour en cas de problèmes dermatologiques. L'utilisation de pansements atraumatiques est recommandée, car la pommade empêche l'adhérence de la gaze à la peau. N'appliquez aucun autre produit localement, car cela pourrait altérer les propriétés thérapeutiques de la pommade. Poursuivez l'application jusqu'à cicatrisation complète.

Avertissements :

Ce produit est destiné à un usage externe uniquement ; l'ingestion peut provoquer des troubles digestifs. Aucune interaction ni incompatibilité avec d'autres médicaments n'est connue. Son utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas fait l'objet d'études spécifiques ; son utilisation doit être évaluée par un médecin.

GANIKDERMA® n'affecte pas l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Contre-indications : Hypersensibilité à l'un des composants.

Effets indésirables :

Du fait de son mode d'action, une sensation de brûlure ou une gêne locale peut survenir immédiatement après l'application, parfois accompagnée d'une hyperthermie péri-lésionnelle, qui disparaît spontanément en 30 à 40 minutes. Des démangeaisons peuvent survenir pendant la cicatrisation. Évitez de vous gratter la zone affectée afin de prévenir les irritations et les lésions des tissus nouvellement formés. Réaction allergique locale à l'un des composants de la pommade.

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. Aucune incompatibilité médicamenteuse n'est connue. Conserver le produit à une température inférieure à 25 °C. Les produits non utilisés et les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

Ingrédients :

Cire d'abeille, Huile d'olive, Extrait de calendula, Huile de tournesol, Huile de ricin hydrogénée, Boswellia, Sous gallate de bismuth, Résine de pin, Camphre.